

# Mode Opérateur Reconditionnement Par 5 tests

Le reconditionnement doit être réalisé par adulte habilité par l'établissement scolaire.

Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique et <b>mettre des gants</b>	
Prendre une enveloppe pré imprimée avec les informations ci-dessous :   <p><b>Autotest antigénique nasal du SARS-CoV-2 (x5)</b>          Fabricant : SD BIOSENSOR          Distributeur : ROCHE DIAGNOSTICS  <b>Dérogation CE</b>          N° LOT et Date de péremption : Voir informations indiquées sur le sachet de la bandelette test SARS-CoV-2 Rapid Antigen</p>  <p>Test positif : → Isolez-vous → Confirmez au plus vite avec un test PCR</p> <p>Test négatif : → Continuez à respecter les gestes barrières</p> <p>Flasher pour plus d'infos</p> <p>2 °C - 30 °C 36 °F - 86 °F</p>	
Insérer 1 mode d'emploi (notice) recto verso incluant également le guide rapide de prélèvement	
Insérer 5 dispositifs d'analyse (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal) emballés individuellement dans un sachet d'emballage	
Insérer 5 tubes tampon d'extraction pré-remplis	
Insérer 5 écouvillons stériles	
Insérer 5 bouchons canules	
Fermer l'enveloppe	

Les éléments supplémentaires contenu dans la boîte de 25 tests non nécessaires à la réalisation du test doivent être jetés chacun de leur filière de tri respectif :

- Mode d'emploi et Guide de référence rapide
- Rack pour tubes de tampon
- Contrôles positif et négatif

